



Nombre

Corrector de postura regulable. Elástico

Adjustable back posture corrector. Elastic

Código externo

02.03.305

Código interno

15.305

Descripción

Brinda corrección postural progresiva, y de esta manera ayuda a prevenir y tratar dolencias asociadas a la columna vertebral y los músculos de la espalda. Una mala postura puede derivar en graves trastornos físicos en diferentes partes del cuerpo, que a mediano y largo plazo pueden pronunciarse. El producto está compuesto por dos piezas elásticas que brindan sostén a los hombros y se ajustan en la zona abdominal, aplicando así la tensión y ajuste necesarios. La zona axilar posee tiras acolchadas, con el fin de evitar posibles molestias e irritaciones, permitiendo un uso confortable a lo largo del día.

Modo de acción

La tensión que se aplica al ajustar el producto genera que los hombros se desplacen hacia atrás; reubicando la columna en la postura adecuada. Su sistema de ajuste y cierre permite regular el nivel de tensión que se ejerce en el espaldar.

Materialidad

Elaborado a partir de un elástico compuesto por elastano y poliéster. Por el tipo de tejido, conforma un producto acolchado, firme y agradable textura.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de pecho

XS	56 - 70 cm.	7798094541112
S	71 - 85 cm.	7798094541129
M	86 - 106 cm.	7798094541136
L	107 - 122 cm.	7798094541143
XL	123 - 135 cm.	7798094541150

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talla diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Pasar ambos brazos por las aberturas circulares, con la parte más angosta hacia adelante.
3. Tomar ambas piezas por los extremos, cruzarlas por la espalda y llevarlas hacia el abdomen.
4. Abrochar regulando la tensión deseada y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Para pieles sensibles utilizar una prenda de algodón debajo del espaldar.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Dolor cervical, torácico y/o lumbar
- * Lumbalgias
- * Protusiones discales
- * Mialgias
- * Cifosis

Composición

Poliéster 67% Elastodieno 33%

Productos relacionados

L1 - E1 - 306 - SLE

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Blanco
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	100 g / 0,1 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global